



SERIE 1 - MAŁE JEST PIĘKNE

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

 greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.
+48 790 329 925, centrala@greenpol.pl, greenpol.pl

ECOLAB[®]

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com

Technologia Soluscope w kompaktowym urządzeniu

W pełni zautomatyzowany proces
reprocesowania endoskopu.

MONITOROWANIE NA KAŻDYM POZIOMIE

Myjnia Serie1 zapewnia odpowiednią ilość jednorazowo używanego preparatu chemicznego w każdym cyklu reprocessowania. Chroni endoskop, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta.

Działanie myjni Soluscope Serie1 obejmuje automatyczny test szczelności zapewniający integralności endoskopu w trakcie cyklu.

Odpowiednio zabezpieczony czujnik sprawdza, czy pokrywa jest właściwie zamknięta w trakcie pracy urządzenia.



BEZPIECZNY PROCES

Mikrobiologiczna jakość wody jest gwarantowana przez fi ltr końcowy wody 0,2 µm oraz opcjonalny moduł trzy-etapowej fi ltracji wstępnej.

Myjnia Serie 1 posiada funkcję automatycznej autodezynfekcji pozwalającą uniknąć ryzyka kontaminacji.

Myjnia Serie 1 oferuje opcjonalne funkcje płukania alkoholem i przedmuchiwania aby ułatwić suszenie kanałów.

*Soluscope Serie 1 wersja PA



Dobrze przemyślana konstrukcja

Prostota i ergonomia.

INTELIGENTNY, ŁATWY W UŻYCIU INTERFEJS PRZYSPIESZAJĄCY PROCEDURĘ

Ekran dotykowy urządzenia Serie 1 oferuje innowacyjny i intuicyjny interfejs. Wystarczy kliknąć ikonę na ekranie, aby uruchomić odpowiedni cykl i w czasie rzeczywistym śledzić każdy etap procesu.



SYSTEM ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKOWALNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA DANymi

Myjnia Soluscope Serie 1 jest wyposażona w wewnętrzną pamięć oraz opcjonalny czytnik kodów kreskowych i drukarkę. Jest kompatybilna z programem EP-Digital Soluscope, umożliwiając elektroniczną identyfikowalność, podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich endoskopów, a także pobieranie próbek mikrobiologicznych i tworzenie raportów serwisowych.



OGRANICZONE DO MINIMUM MANIPULOWANIE W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA SKAŻENIA KRZYŻOWEGO

Specjalnie zaprojektowane złącza ograniczają konieczność manipulowania endoskopem, a tym samym zmniejszają ryzyko kontaminacji.



ŁATWY DOSTĘP W PRZYPADKU KONSERWACJI I SERWISOWANIA

Instalacja myjni Serie 1 wymaga tylko podłączenia zasilania elektrycznego oraz dopływu i odpływu wody. Jako mobilne i kompaktowe urządzenie sprawdza się w każdych warunkach, również w niewielkich pomieszczeniach. Dostęp do preparatów chemicznych oraz fi ltra końcowego wody jest od strony przedniego panelu urządzenia, co umożliwia szybką i łatwą wymianę.

Potwierdzona skuteczność

ZNAK CE / zgodność z normą ISO 15883 - części 1 i 4.

POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO

Skuteczność preparatów chemicznych Soluscope została potwierdzona oraz przetestowana w oparciu o normę EN ISO 15883-4:2018. Preparaty te są przeznaczone do stosowania wraz z myjnią **Soluscope Serie 1** i wykazują kompatybilność materiałową z większością endoskopów giętkich.

ZŁĄCZA

Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Soluscope, złącze jest podłączone do endoskopu w trakcie całej procedury reprocesowania, od etapu dezynfekcji do etapu przechowywania.

Połączenie to gwarantuje identyczny poziom higieny złącza i endoskopu, zapewniając wydajną i bezpieczną procedurę przed użyciem u pacjenta w ramach zabiegu.



SOLUSCOPE PA

- Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego
- Kompatybilność z większością endoskopów giętkich



SOLUSCOPE GTA

- Preparat do dezynfekcji na bazie aldehydu glutarowego
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego
- Kompatybilność z większością endoskopów giętkich



SOLUSCOPE EZ

- Trójenzymatyczny preparat myjący
- Potwierdzona skuteczność wobec biofilmu i białek

SERIE 1



Soluscope

“Ecolab oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie reprocessowania endoskopów giętkich”



OFERTA ECOLAB

Ecolab oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie reprocesowania endoskopów giętkich.

Do każdego etapu w cyklu reprocesowania proponuje odpowiednie produkty.

Każdy z tych produktów jest certyfikowany, łatwy w użyciu i wydajny, tak by zmniejszyć codzienne obciążenie pracą.




greenpol dystrybutor

Instytut Kształtowania Środowiska
Sp. z o.o., +48 790 329 925
centrala@greenpol.pl, greenpol.pl

Zdjęcia poglądowe - Ecolab zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w specyfikacji podanej w niniejszej ulotce bez powiadomienia czy zobowiązań.




1434
SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

ECOLAB[®]

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com